

APC Flash-Free

Брекеты с преднанесенным адгезивом

Теперь адгезивная система APC Flash-Free доступна в 5 видах продуктов, для полной установки 7x7.



Керамические брекет
Clarity Advanced: Эстетические
низкопрофильные брекет.



Керамические брекет
Clarity SL: Эстетические брекет
со всеми преимуществами
самолигирования.



Металлические брекет
Victory Low Profile: лигатурные
брекет с низким профилем.



Металлические брекет
SmartClip SL3: Уникальные
самолигирующие брекет для
эффективности лечения.



Замок-трубка
Victory Series Superior Ft:
оптимизированный дизайн
обеспечивает лучшее прилегание,
удобство использование и
эффективность лечения.

3M

Уполномоченный представитель
на территории РФ ЗАО «3М Россия»
121614, Россия, Москва,
ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474
Тел.: +7 (800) 250 8474
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3mrussia.ru

Клиентский центр
620014, Екатеринбург
ул. Бориса Ельцина, 1а
БЦ «Президент», 11 этаж
Тел.: +7 (343) 228 22 88
Факс: +7 (343) 228 22 99

3M, логотип 3M, являются
зарегистрированными товарными
знаками компании «3М Компани».
© 3M 2018. Все права защищены.

3M Наука,
Воплощенная в жизнь™

APC Flash-Free

Брекеты с преднанесенным адгезивом



Революционный подход к фиксации брекетов

- ▶ Низкий коэффициент самопроизвольного дебондинга
- ▶ Экономит до 40% времени на установку брекетов
- ▶ Защищает эмаль зубов пациентов на протяжении всего лечения
- ▶ Легкое снятие брекетов и удаление остатков адгезива
- ▶ Не нужно удалять излишки адгезива



Брекеты с преднанесенным адгезивом APC Flash-Free: Эффективная система установки брекетов.

Экономит время и деньги



- ▶ Время фиксации сокращено на 40%
- ▶ Простое и быстрое снятие брекетов и удаление остатков клея

Среднее время фиксации 1 брекета¹




Время фиксации включает в себя установку, позиционирование и удаление излишков адгезива

Потрясающая эффективность фиксации



- ▶ Отсутствие этапа удаления излишков позволяет снизить риск нарушения позиционирования брекета
- ▶ Низкий коэффициент самопроизвольного дебондинга


Средний коэффициент дебондинга

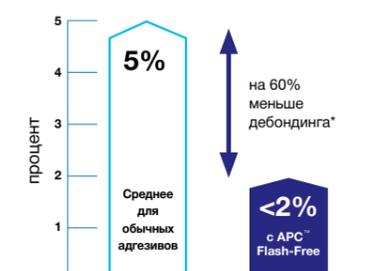

Защищает эмаль зубов



- ▶ Адгезивная система APC Flash-Free герметично закрывает пространство под брекетом и до 2 мм по его периметру. В результате эмаль будет защищена от воздействия кислоты не только под брекетом, но и по его краям, куда часто забивается пища.

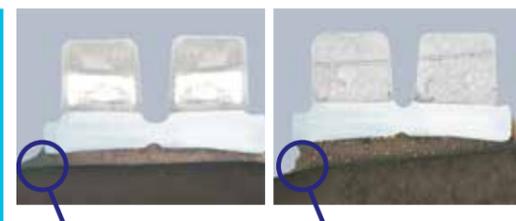

APC Flash-Free Гладкая база

Traditional Adhesive Шероховатая, неровная база адгезива из-за шага удаления остатков

Легкое снятие




- ▶ Брекеты Clarity Advanced и Clarity SL легко снимаются, не травмируя эмаль, благодаря концентратору напряжения - особой технологии компании 3M.



Как действует адгезив APC Flash-Free?

- ▶ Подложка из нетканого материала, пропитанная адгезивом, крепится к основе брекета.
- ▶ В момент установки адгезив контролируемо растекается под брекетом и пропитывает нетканую подложку, не позволяющую клею выйти дальше двух миллиметров от края, запечатывая все поднутрения под площадкой брекета.
- ▶ Труднодоступные для очистки места – стык брекета и зуба – дополнительно защищены

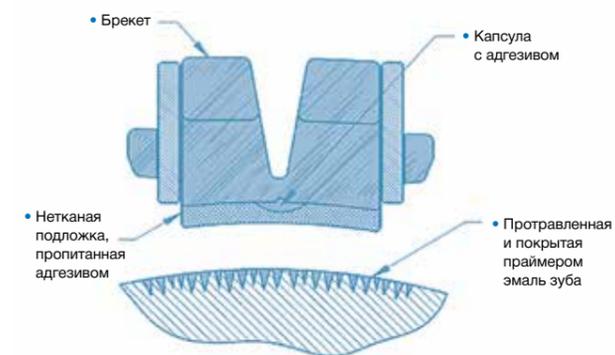

APC Flash-Free

Брекеты с преднанесенным адгезивом



Созданный на основе научных достижений 3M, APC Flash-Free опирается на 3 высокотехнологичные платформы 3M - нанотехнологии, адгезивы и нетканые материалы. Именно они использовались для создания инновационного дизайна адгезивной подложки APC Flash-Free.



Простой и эффективный процесс фиксации.

1. Протравить и нанести праймер.



2. Просто установить брекет.



3. Полимеризовать и всё!

